

## Navina Classic - tuotetiedot

### Tuotekuvaus

Suolihuuhtelujärjestelmä ja manuaalinen ohjausyksikkö.

### Säilyvyys ja käyttö

Muiden Navina-huuhtelujärjestelmän komponenttien säilyvyys on 3,5 vuotta, mutta Navina-katetrien ja Navina-kartion säilyvyys on 2 vuotta. Kun Navina-komponentit on pakattu seteiksi, setin säilyvyyden määrää se komponentti, jolla on lyhin säilyvyys.

Navina-katetrit ja -kartiot ovat kertakäyttöisiä, vesisäiliötä saa käyttää 15 kertaa ja Navina Classic -ohjausyksikköä ja letkustopakkausta 100 kertaa.

### Valmistusmateriaalit

**Katetrin materiaali:** Styreeni-etyleni-butyleeni-styreeni (SEBS) / polypropeeni (PP), ja hydrofiilisen pinnoitteen materiaalina polyvinyyliipyrrolidoni (PVP).

**Sisäpakkauksen materiaali:** PE/PET-pussi.

**Ulkopakkauksen materiaali:** Kartonki ja aaltokartonki.

### Käyttötarkoitus

Navina Systems on tarkoitettu suolihuuhteluun, jossa vettä johdetaan paksusuolen alaosaan rektaalikatetrilla.

### Käyttöaiheet

Navina Systems -järjestelmä on tarkoitettu auttamaan ulosteinkontinenssista, kroonisesta ummetuksesta ja/tai aikaa vievästä suolen toimittamisesta kärsiviä aikuisia ja vähintään 3-vuotiaita lapsia. Kun paksusuolen alaosaan johdetaan vettä, suolen peristalttiset lihakset aktivoituvat ja alkavat tyhjentää paksusuolta ja peräsuolta.

### Vasta-aiheet

**ÄLÄ** käytä Navina Systems -järjestelmää, jos sinulla on yksi tai useita seuraavista vasta-aiheista:

- Tiedossa oleva peräaukon tai paksu- ja peräsuolen stenoosi.
- Aktiivinen tulehdussellinen suolistotauti.
- Akuutti divertikuliitti.
- Paksu- ja peräsuolen syöpä.
- Iskeeminen koliitti.
- Aiempi peräaukon tai paksu- ja peräsuolen leikkaus alle 3 kuukautta sitten.
- Aiempi tähytyksessä tehty polypinpoistoleikkaus alle 4 viikkoa sitten.

Koska luettelo ei välttämättä ole tyhjentävä, terveydenhuollon ammattilaiset ottavat aina huomioon myös yksilölliset tekijät.



### Navina Classic System

Viite	Tyyppi	Spesifikaatio
6900545	Navina Classic -järjestelmä, Regular	1 Navina Classic -ohjausyksikkö
6900745	Navina Classic -järjestelmä, Small	1 vesisäiliö
6901745	Navina Classic -järjestelmä, kartio	1 letkustopakkaus 2 rektaalikatetria 1 Navina-kotelo 1 lisätarvikepakkaus
6900645	Navina Classic -järjestelmä Regular, täyttöpakkaus	1 Navina Classic -ohjausyksikkö
6900845	Navina Classic -järjestelmä Small, täyttöpakkaus	1 vesisäiliö
6901845	Navina Classic -järjestelmä Kartio, täyttöpakkaus	1 letkustopakkaus 2 rektaalikatetria
6900310	Navina-kulutustarvikesetti, Regular	
6900410	Navina-kulutustarvikesetti, Small	1 vesisäiliö
6901610	Navina-kulutustarvikesetti, kartio	15 rektaalikatetria
6894010	Navina-katetrisetti, Regular	10 rektaalikatetria
6894310	Navina-katetrisetti, Small	
6901110	Navina-letkustopakkaus	1 katetritietku 1 vesisäiliöletku
6901200	Navina-tarvikkeet	2 tarttumisrengasta (vertikaalinen, 1 horisontaalinen) 1 kaulanauha 1 kiinnittimen hihna 1 Navina Smart -kiinnittimen solki
6901345	Navina Classic -ohjausyksikkö	1 Navina Classic -ohjausyksikkö

Navina™ Classic

